

Garrot tourniquet tactique - Orange



- 1 Boucle de la bande
- 2 Tige du guindeau Varilla del cabestrante
- 3 Clip de verrouillage de la tige -
- 4 Bande auto-adhésive
- 5 Sangle de fixation de la tige Correa de sujeción de la varilla

Notification: Lorsqu'il est appliqué conformément aux instructions, ce garrot est un dispositif sûr et efficace qui permet de contrôler les hémorragies des extrémités menaçant le pronostic vital. Si vous n'êtes pas sûr d'où vient l'hémorragie ou si vous n'avez pas le temps de trouver son origine selon le cas, le garrot peut être appliqué de manière efficace sur les vêtements aussi haut que possible sur le bras ou la jambe. Le garrot ne doit pas être appliqué sur des objets solides se trouvant à l'intérieur des vêtements. Dès que la situation le permet, le membre blessé doit être évalué et le garrot repositionné environ 5 ou 7 cm au-dessus de la blessure directement sur la peau.



1. Appliquez le garrot en amont du site de l'hémorragie et passez la bande autour du membre blessé.



2. Serrez bien la bande et fixez-la en la re-tournant sur elle-même.



3. Enroulez la bande autour du membre en veillant à ce qu'elle y adhère bien



4. Tournez la tige jusqu'à ce que l'hémorragie rouge vif s'arrête.



5. Placez la tige à l'intérieur du clip et verrouillez.



6. Collez la bande par-dessus la tige ; pour les petites extrémités, continuez à enrouler la bande autour de l'extrémité et par-dessus la tige du guindeau.



7. Fixez la tige et la bande à l'aide de la sangle ; faites-la adhérer au crochet opposé situé sur le clip du guindeau. Indiquez l'heure de l'application.

	Conservare in luogo fresco ed asciutto. Keep in a cool, dry place. Á conserver dans un endroit frais et sec. Conservar en un lugar fresco y seco. Armazenar em local fresco e seco. An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον يحفظ في مكان بارد وجاف		Prodotto conforme alla Direttiva Europea. Product complies with European Directive. Ce produit est conforme à la directive européenne. Producto conforme a la Directiva Europea. Produto em conformidade com a Diretiva Europeia. Produkt gemäß EU-Richtlinie. Προϊόν σύμφωνο με την Ευρωπαϊκή Οδηγία. الأوروبي الاتحاد شوجيهات مع يتوافق جنج
	Leggere e seguire attentamente le istruzioni per l'uso. Read instructions carefully. Lire et suivre attentivement la notice. Leer y seguir atentamente las instrucciones de uso. Ler e seguir atentamente as instruções de uso. Gebrauchsanweisung sorgfältig lesen und befolgen. Διαβάστε και ακολουθήστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης اقرأ بدقة وحرص تعليمات الاستخدام		Fabbricante. Manufacturer. Fabricant. Fabricante. Fabricante. Hersteller. Παραγωγός. الشركة المصنعة
	Conservare al riparo dalla luce solare. Keep away from sunlight. Á conserver à l'abri de la lumière du soleil. Conservar al amparo de la luz solar. Guardar ao abrigo da luz solar. Vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern. Κρατήστε το μακριά από ηλιακή ακτινοβολία يحفظ بعيداً عن ضوء الشمس		Leggere attentamente le istruzioni per l'uso. Please read instructions carefully. Lire attentivement la notice. Leer atentamente las instrucciones de uso. Ler atentamente as instruções de uso. Gebrauchsanweisung sorgfältig lesen. Διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης اقرأ بدقة وحرص تعليمات الاستخدام
	Codice prodotto. Product code. Code produit. Código producto. Código produto. Erzeugniscode. Κωδικός προϊόντος كود المنتج		Numero di lotto. Lot number. Numéro de lot. Número de lote. Número de lote. Chargennummer. Αριθμός παρτίδας رقم الدفعة (انظر العبوة / المغلف)

REF 25526 - 25527

 Gima S.p.A. - Via Marconi, 1
20060 - Gessate (MI) - Italy
Made in China
