



	LYNE UP
Usage prévu	La technologie LYNE vise à soutenir les muscles de la colonne vertébrale et à maintenir la mobilité des articulations et le tonus musculaire en utilisant le principe de l'autocorrection.
Condition médicale / application prévue	Mal de dos mécanique ou prévention ou mal de dos.
Contre-indications	Utilisateurs ayant les pathologies: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Maladies inflammatoires en phase aiguë</li> <li>- Pathologies, entraînant un affaiblissement des articulations, des muscles, des tendons, etc.</li> <li>- Ostéoporose</li> <li>- Maladie inflammatoire aiguë ou entorse de l'épaule</li> <li>- Grossesse</li> <li>- Fracture / compression vertébrale non consolidée</li> <li>- Entorse</li> <li>- Spondylarthrite dégénérative</li> <li>- Sténose du canal radiculaire</li> <li>- Instabilité vertébrale (dégénérative)</li> <li>- Disque dégénératif</li> </ul>
Précautions	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ATTENTION:</b> Les produits LYNE doivent être lavés en machine à 30° avant la première utilisation.</li> <li>• Tenir les produits LYNE à l'écart du feu ou d'une source de chaleur importante ou d'une source électrique à haute tension.</li> <li>• Ne serrez pas trop fort les sangles pour éviter de créer un effet de garrot.</li> <li>• Portez la partie du produit couvrant la taille sur le dessus d'un sous-vêtement ordinaire pour éviter d'abîmer la peau en raison du positionnement de la bande antidérapante.</li> <li>• En cas d'inconfort, d'irritation, enlevez le produit et consultez le service clientèle.</li> <li>• Stockez et conservez les produits LYNE à température ambiante, loin de toute source de chaleur et de préférence dans leur emballage d'origine.</li> <li>• Pour des raisons de performance et d'hygiène, ne laissez pas les produits à d'autres clients.</li> </ul>
Avertissement	<ul style="list-style-type: none"> <li>• N'exposez pas les produits à une source de chaleur importante.</li> <li>• Ne pas porter les produits à proximité d'un feu ou d'un solvant.</li> <li>• Ne pas porter les produits LYNE pour aller nager ou pratiquer un sport aquatique.</li> </ul>
Entretien	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reportez-vous à l'étiquette du produit pour les instructions d'entretien.</li> <li>• Laver en machine à 30° après chaque usage (recommandé), programme doux ou synthétique, de préférence à l'aide d'un sac de lavage.</li> <li>• N'utilisez pas de détergents, d'assouplissant autre que la lessive classique et de produits agressifs tels que le chlore</li> <li>• Essorage à 700 tours/minute.</li> <li>• Laissez sécher à l'air libre, à l'abri de toute source de chaleur.</li> </ul>
Domaine d'application	Occupation sédentaire avec une mauvaise posture récurrente caractérisée par : <ul style="list-style-type: none"> <li>- une colonne vertébrale en forme de C</li> <li>- Diminution du tonus abdominal</li> <li>- Tension des muscles cervicaux, du haut du dos et lombaires</li> <li>- Douleurs lombaires, dorsales ou cervicales régulières pendant les heures de travail qui peuvent se prolonger jusqu'au soir.</li> </ul>
Population cible	Toute personne sédentaire ou active qui peut souffrir de douleurs rachidiennes mécaniques
Durée d'utilisation ou de contact avec le corps	21 jours puis 2j/semaine
Nombre maximum d'utilisations	Jusqu'à 200 Lavages
Partie du corps en contact avec le produit	Épiderme de la partie supérieure du corps.